




Swap Médical

Notice d'utilisation

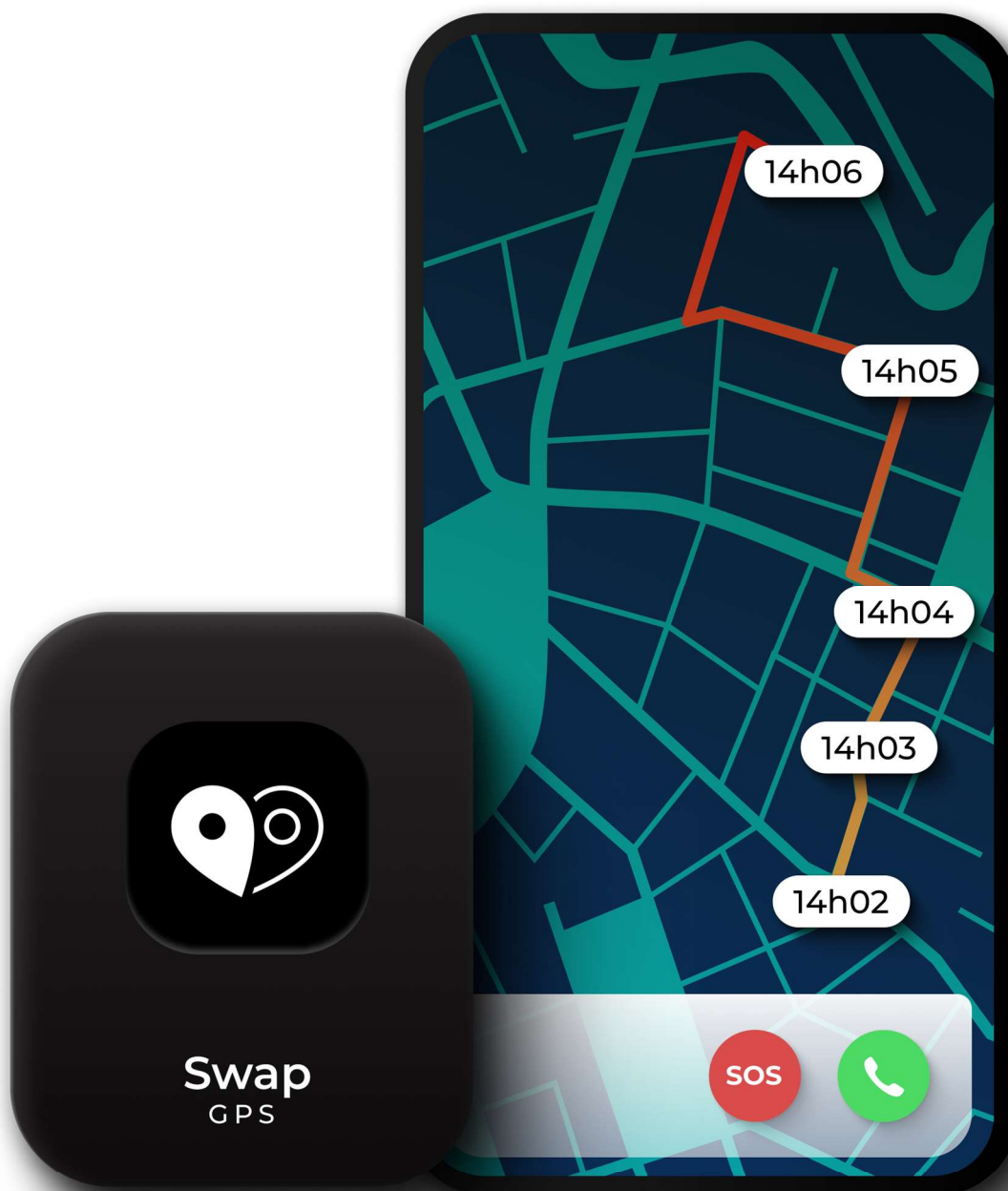

1- Mise en route

A- Rechargement du Swap :

Brancher le câble USB à sa prise d'alimentation USB adaptée (5v - 1A minimum), le temps de rechargement est de ~3h (0 => 100 %)



B- Inscription du Swap à My Swap :

L'inscription et le suivi du **Swap** se fait via notre plateforme sécurisée **My Swap**, disponible :

- ◆ [recommandé] en ligne sur ordinateur ou smartphone : my.swap-gps.com
- ◆ Apple Store et Play Store : '**Swap GPS**'

Dans **My Swap**, rendez-vous dans la partie **Inscription** avec le **Numéro de Série** et la **Clé de Sécurité** imprimés dans la boîte, et suivez les instructions décrites dans **My Swap**.

✓ Inscription dans **My Swap**

✓ Le rechargement de 3h

C- Initialisation du GPS :

Désormais effectuer une promenade **à pied** avec le **Swap** pendant **environ 15 minutes** pour initialiser la balise GPS pour la 1^{ère} fois.

💡 : Se promener à plusieurs centaines de mètres de son domicile, pour voir les premiers points GPS sur **My Swap**.

💡 : Pour faciliter la 1^{ère} géolocalisation, vous pouvez effectuer plusieurs boutons d'alerte en restant appuyé 3 secondes sur le bouton SOS du **Swap**.

👍 Votre **Swap** est correctement initialisé dans **My Swap** si :


- ✓ Des points GPS sont visibles
- ✓ Le niveau de batterie est affiché



Votre **Swap** est désormais prêt pour vous localiser dans vos déplacements du quotidien.

2- Contenu


A- Swap Medical :

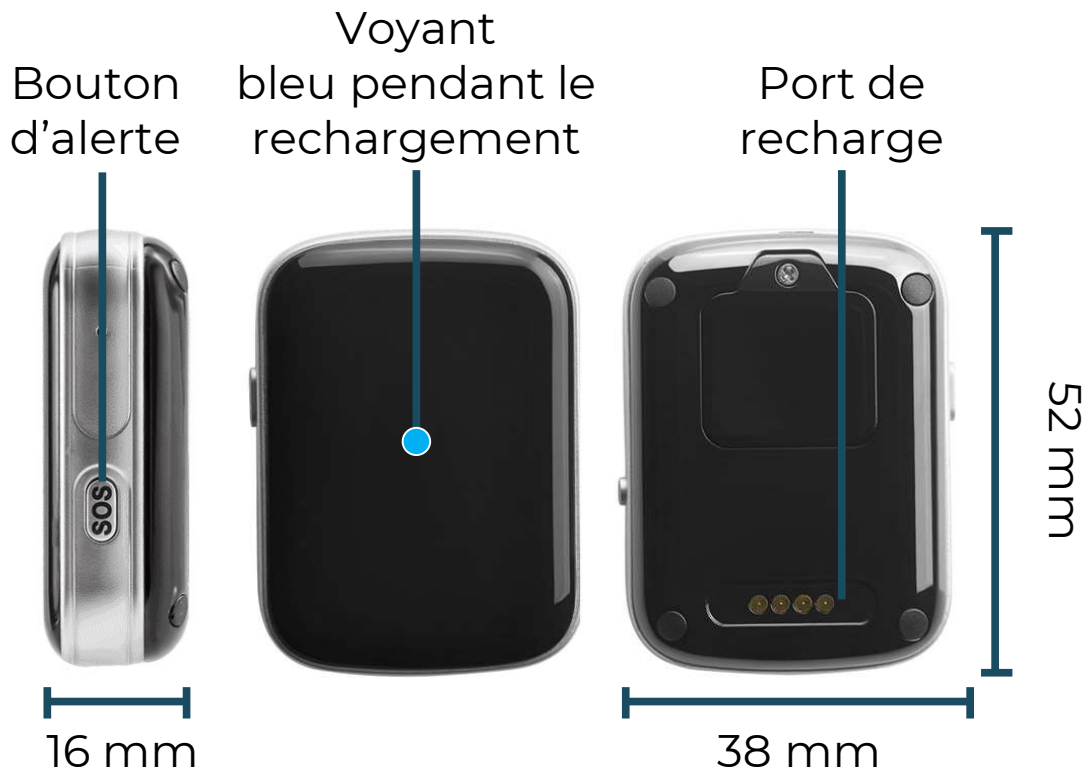

B- Accessoires :



3- Fonctionnement

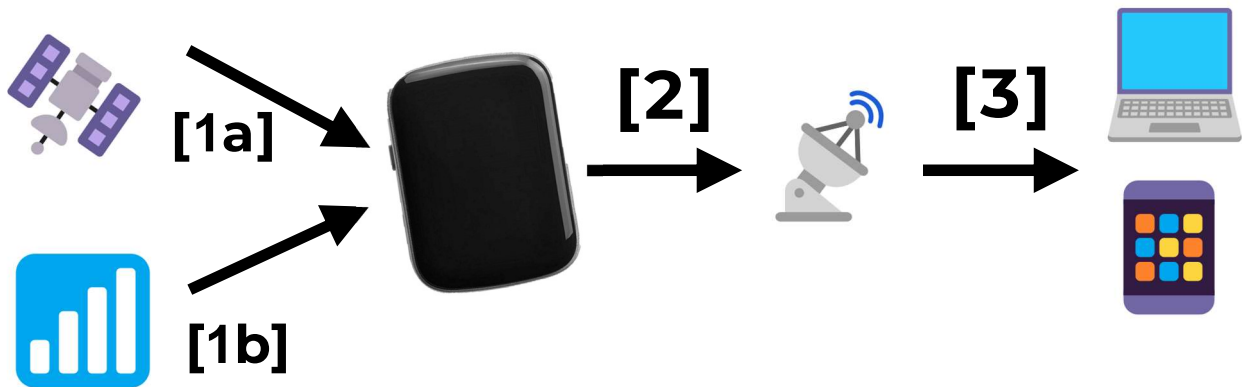

[1a+1b]: Pour se géolocaliser précisément le **Swap** est en liaison :

- ◆ en extérieur, avec 72 satellites autour de la Terre.
- ◆ en intérieur, en analyse permanente des Wi-Fi® autour de lui.

[2]: Le **Swap** est équipé d'une carte SIM intégrée (inutilisable avec un autre appareil). Une fois sa position obtenue par GPS, il l'envoie par les réseaux cellulaires via le meilleur opérateur téléphonique de son secteur.

[3]: Les utilisateurs visualisent en direct la géolocalisation du **Swap** via la plateforme **My Swap**, sur leur smartphone et leur ordinateur.

4- Questions fréquentes

Fonctionnement du Swap : Il suffit de recharger le **Swap** pour qu'il démarre en quelques secondes en émettant une musique.

1ère activation : Lors de la 1ère activation du **Swap**, il doit être rechargé pendant au minimum 3 heures. Ensuite effectuer une sortie à pied en extérieur pour initialiser correctement la fonction GPS. Tant que cette fonction n'est pas initialisée, le **Swap** est inscrit sur la plateforme **My Swap** avec sa dernière position GPS connue, c'est-à-dire son usine de fabrication (près de Marseille).

Système de géolocalisation apprenant :

Le positionnement du **Swap** sera plus précis après plusieurs sorties dans la même zone géographique. En effet le **Swap** est doté d'un système innovant de géolocalisation qui lui permet d'améliorer son positionnement par la récurrence des déplacements.

Bouton d'alerte : 3 cas d'utilisations :

- Déclencher une alerte du **Swap** sur la plateforme **My Swap** : appuyer pendant 3 secondes sur le bouton
- Éteindre le **Swap** : appuyer pendant 15 secondes sur le bouton
- Rallumer le **Swap** : appuyer pendant 3 secondes sur le bouton
- Vérifier que le **Swap** est allumé : appuyer 1 seconde sur le bouton et constater l'allumage du voyant bleu (cela ne déclenchera pas d'alerte sur la plateforme **My Swap**).

Swap clignotant : Le **Swap** est muni d'un voyant bleu qui clignote lorsque sa batterie est presque vide.

Autonomie : Le **Swap** possède une autonomie allant jusqu'à 5 à 7 jours via sa batterie au lithium-polymère haute performance pour un suivi en temps réel (toutes les minutes). Après quelques minutes d'inactivité, le **Swap** immobile se met en veille automatiquement.

Alertes sur My Swap : Pour recevoir les alertes sur vos différents appareils, veillez à avoir une connexion internet stable et les dernières mises à jour. Attention, les modes 'Silencieux', 'Ne pas déranger' ou 'Avion' bloqueront les alertes envoyées par la plateforme '**My Swap**'.

Erreur de position / Sans nouvelle : En cas de couverture réseau trop faible ou d'intempéries, le **Swap** peut être coupé du réseau téléphonique. Les informations transmises à la plateforme **My Swap** sont alors restreintes tant que le **Swap** ne retrouve pas un réseau stable lui permettant de transmettre à nouveau des informations de qualité.

Besoin d'aide ?

Aide en ligne : **swap-gps.zendesk.com**

Vous pouvez nous contacter par e-mail (en indiquant votre numéro de série). Notre équipe fera le maximum pour répondre rapidement : **support@swap-gps.com**

Mentions légales / CGU / CGV :
www.swap-gps.com/legal